

INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

Dirección : Avenida Teniente Hugo Ortiz y Balzar S/N. Conjunto Industrial "REQUIMEC". Quito-Ecuador

PBX: (593-2) 2671-740 / (593-2) 2671-015 / (593-2) 2670-331 / (593-2) 2671-753

e-mail: info@proindusquim.com

Página Web: www.proindusquim.com

ELABORACIÓN: Martes, 15 de Junio de 2010

ACTUALIZACIÓN : 14-06-10

CÓDIGO : FT 00390

DESCRIPCIÓN GENERAL

NOMBRE :	SPOREC
TIPO DE PRODUCTO :	Desinfectante - Esterilizante en frío de amplio espectro
USOS:	Instrumentos médicos , quirúrgicos y dentales (metálicos y plásticos)
REG. SANITARIO :	PH-8.566-1/12.00

ESPECIFICACIONES MATERIAL DE EMPAQUE

1 LITRO	4 LITROS (GALÓN)	20 LITROS (CANECA)	220 LITROS (TANQUE)
Envase de polietileno blanco	Envase de polietileno blanco	Envase de polietileno reforzado rojo	Envase de polietileno reforzado verde
Sellado por inducción (sello aluminio)	Sellado por inducción (sello aluminio)		Sellado por calor (sello aluminio)
Tapa azul con sello de seguridad	Tapa verde con sello de seguridad	Tapa con sello de seguridad	Tapa blanca roscable hacia el interior del tanque
Etiqueta de papel impresa full color con barniz UV	Etiqueta de papel impresa full color con barniz UV	Etiqueta de papel impresa full color con barniz UV	Etiqueta de papel impresa full color con barniz UV
Caja de cartón corrugado impreso (Capacidad 20 unidades)	Collarín de seguridad de PVC Caja de cartón corrugado impreso (Capacidad 6 unidades)		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COLOR:	Amarillo claro
TRANSPARENCIA:	Si
FRAGANCIA:	Estándar
APARIENCIA:	Líquido
VISCOSIDAD:	10 - 15 cps
ESPUMA:	Baja
pH:	5.0 - 6.0
ACCIÓN BACTERICIDA:	100% 1 minuto
ACCIÓN FUNGICIDA:	100% 1 minuto

MODO DE USO

- Activación: agregue todo el contenido del activador al galón, mezcle durante 30 segundos.
 - Antes de sumergir los instrumentos en la solución de Sporec activada, deben ser lavados con detergente y agua, procurando una cuidadosa limpieza en las cavidades del instrumento.
 - Para desinfección, sumerja en solución de Sporec durante 30 minutos.
 - Para esterilización, sumerja de 8 a 9 horas.
- Una vez terminada la desinfección/esterilización, retirar el material de la solución Sporec y enjuagar con abundante agua estéril.

PRECAUCIONES

- Mantener FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

INGREDIENTES

Agua desmineralizada , Glutaraldehído, Aditivos y Estabilizantes.

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- Producto TÓXICO.

PRESENTACIÓN

- 1 litro
- 4 litros
- 20 litros
- 220 litros

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

- Producto Biodegradable.

ALMACENAMIENTO

- Temperatura de almacenamiento entre 8°C a 25 °C

PRIMEROS AUXILIOS

- Ingiera abundante agua para diluir el producto
- Consulte inmediatamente a su médico
- En caso de contacto con los ojos, lavarse bien con bastante agua y consultar un médico especialista.
- Puede causar irritación si entra en contacto con la piel. Lavar bien con abundante agua.
- No inhalar. Aplíquese en sitios ventilados.

APILAMIENTO MÁXIMO

- 5 cajas x 20 unidades de 1 litro c/u
- 4 cajas x 6 unidades de 4 litros c/u
- 2 canecas de 20 litros c/u
- 1 tanque de 220 litros

INFLAMABILIDAD

- Producto no inflamable

MANEJO ESPECIAL

- Utilizar guantes para su aplicación.
- Utilizar mascarilla y gafas de protección.

NUESTRA EMPRESA GARANTIZA LA CALIDAD Y RESULTADO DE SUS PRODUCTOS Y OFRECE PERMANENTE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL USO Y APLICACIÓN DE LOS MISMOS

PROINDUSQUIM S.A.

PBX: 2671-015 • Casilla: 17-11-6550 • Quito-Ecuador
www.proindusquim.com