

INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

Dirección : Avenida Teniente Hugo Ortiz y Balzar S/N. Conjunto Industrial "REQUIMEC". Quito-Ecuador

PBX: (593-2) 2671-740 / (593-2) 2671-015 / (593-2) 2670-331 / (593-2) 2671-753

e-mail: info@proindusquim.com

Página Web: www.proindusquim.com

ELABORACIÓN: Lunes, 17 de Mayo de 2010

ACTUALIZACIÓN : 14-07-10

CÓDIGO : FT 00020

DESCRIPCIÓN GENERAL

NOMBRE : TESTING - LINE

TIPO DE PRODUCTO : Test de Ureasa para Helicobacter pylori

USOS: Detección de la presencia de la bacteria Helicobacter pylori en el sistema digestivo (por biopsia)

REG. SANITARIO : N/A

ESPECIFICACIONES MATERIAL DE EMPAQUE

CAJA X 50 UNIDADES

Placa plástica transparente de PET VI 0.81

Etiqueta de papel impresa full color con barniz UV y con adhesivo sobre impresión.

Caja de cartulina impresa full color con barniz UV (Capacidad 50 unidades)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COLOR ANTES DE ACTIVACIÓN : Amarillo

COLOR DESPUÉS DE ACTIVACIÓN : Rosado (cuando hay presencia de la bacteria)

MODO DE USO

- Identifique la placa con los datos del paciente al reverso de la misma
- Tire de la etiqueta y deje al descubierto el medio de cultivo
- Introduzca la biopsia en el medio de cultivo con la pinza del endoscopio.
- Tire de la etiqueta para cubrir el medio , pegando la etiqueta a la superficie de la placa
- Coloque la placa en un lugar seco a temperatura ambiente durante 24 horas.

INGREDIENTES

Agua desmineralizada , Agares y Reactivos.

PRESENTACIÓN

- Placa individual para 1 ensayo

PRECAUCIONES

- MANTENER REFRIGERADO

ALMACENAMIENTO

- Temperatura de almacenamiento entre 8°C a 25 °C

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- Producto NO TÓXICO.

APILAMIENTO MÁXIMO

- 2 cajas x 50 unidades c/u (Empaque refrigerado)

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

- Producto Biodegradable.

MANEJO ESPECIAL

- No requiere ningún tipo de manejo especial

INFLAMABILIDAD

- Producto no inflamable

NUESTRA EMPRESA GARANTIZA LA CALIDAD Y RESULTADO DE SUS PRODUCTOS Y OFRECE PERMANENTE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL USO Y APLICACIÓN DE LOS MISMOS